

ALLGEMEINE HINWEISE



Nebenwirkungen:

Unter der Voraussetzung einer sachgemäßen Anwendung sind Nebenwirkungen bis jetzt nicht bekannt. Zu fest anliegende Orthesen können zu lokalen Druckerscheinungen führen oder in seltenen Fällen Blutgefäße oder Nerven einengen.

Kontraindikation:

Hauterkrankungen, -verletzungen in dem Bereich, in dem die Orthese zum Einsatz kommt, insbesondere mit entzündlichen Erscheinungen. Narben mit Schwellungen, Rötungen und/oder Überwärmung, Lymphabflussstörungen.

Ausgeprägte Supinationsstellung im Sprunggelenk des betroffenen Fußes.

Entsorgung:

Bitte entsorgen Sie das Medizinprodukt nach Nutzungsende entsprechend der örtlichen Vorgaben.

Gewährleistung:

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Bei unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen. Beachten Sie dazu auch die entsprechenden Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.

Materialzusammensetzung:

Orthese: 100% Polyamide
Polster: Polyurethan, Polyester

Pflegehinweise:

Die festen Bauteile mit einem feuchten Tuch abwischen. Gurte und Polster entfernen und mit einem milden Waschmittel von Hand waschen, mit ausreichend klarem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen. NICHT in den Trockner geben.



Sicherheitshinweise:

Diese Orthese ist nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung und den aufgeführten Anwendungsgebieten zu tragen. Die nötige Stabilität kann nur dann gewährleistet werden, wenn die Orthese fest am Körper sitzt. Um einen optimalen Sitz der Orthese sicherzustellen, sollte das Produkt individuell von geschultem Fachpersonal angepasst werden.

Die Orthese ist nicht flamsicher und darf daher nicht in der Nähe von offenem Feuer getragen werden. Nehmen Sie selbstständig keine Veränderungen an der Orthese vor, kontaktieren Sie zu diesem Zweck Ihren Orthopädietechniker. Sollte die Orthese Verschleißerscheinungen aufweisen oder ein Bauteil beschädigt sein, ist die Orthese zu ersetzen.

Wir bitten Sie uns über alle im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt aufgetretenen Vorkommnisse und schwerwiegende Ereignisse in Kenntnis zu setzen.

Vorgesehene Patientengruppe:

Angewendet wird das Medizinprodukt durch Patienten, die eine Einweisung von geschultem Fachpersonal erhalten haben. Das Medizinprodukt ist für jugendliche und erwachsene Patienten von 12 bis 99+ Jahren vorgesehen.

Achtung!

Tragen Sie die Orthese nicht direkt auf der Haut. Wir empfehlen Ihnen die Orthese über einem dünnen, saugfähigem Kleidungsstück zu tragen, so dass die Feuchtigkeit von der Haut wegtransportiert werden kann.



Hersteller:

Tenortho Srl
via Trento e Trieste 100 | 20853 Biassono (MB) Italy
Tel. +39 039 8943960
www.tenortho.com | info@tenortho.com



Händler:

Spektramed GmbH | Prämienstraße 96 | D-41844 Wegberg
t 0 24 34 . 99 33 4-0 | f 0 24 34 . 99 33 4-20
www.spektramed.de | info@spektramed.de



Version 10 / 10.2021

Aktiv AFO light Gebrauchsanweisung



**Spektramed**
Auf den Punkt gebracht

Aktiv AFO light

Bezeichnung:

Aktiv AFO light
Fußheberorthese/Ankle
Foot Orthosis

Hilfsmittelnummer:

23.03.02.5



Art.-Nr.	Größe	Höhe	Schuhgröße
1000 23211	S links	28 cm	35-39
1000 23212	M links	29 cm	40-43
1000 23213	L links	34 cm	41-44
1000 23014	XL links	39 cm	>44
1000 23201	S rechts	28 cm	35-39
1000 23202	M rechts	29 cm	40-43
1000 23203	L rechts	34 cm	41-44
1000 23204	XL rechts	39 cm	>44

Produktbeschreibung inklusive Zweckbestimmung:

Therapeutisches und nicht-invasives Medizinprodukt zur Korrektur einer Fußfehlstellung und zur Stabilisierung des Fußes.

Indikation:

- Fußheberschwäche
- leichter Spitzfuß

Wirkungsweise:

- Stabilisation des Fußes in Dorsalextension

Information für den Patienten:

Die AFO light verhindert eine Spitzfußstellung und führt das obere Sprunggelenk durch Ihre schalenförmige Bauweise. Durch die definierte Flexibilität ermöglicht sie ein harmonisches Gangbild. Die Orthese ist so konzipiert, dass sie unauffällig unter der Kleidung zu tragen ist. Vor der Verwendung ist eine individuelle Anpassung durch einen Orthopädietechniker erforderlich.

Anwendung:

- Schritt I:** Öffnen Sie den Klettverschluss an der Wadenspange.
- Schritt II:** Stellen Sie den Fuß der betroffenen Seite auf das Fußteil der Orthese.
- Schritt III:** Achten Sie darauf, dass Ferse und Wade fest an der hinteren Schale anliegen.
- Schritt IV:** Schließen Sie nun den Klettverschluss mit leichtem Zug, so dass die Spange in Position bleibt.
- Schritt V:** Heben Sie nun den Fuß gemeinsam mit der Orthese an, indem Sie die Ferse mit Ihrer Hand umschließen.
- Schritt VI:** Führen Sie nun die Orthese mit der Fußspitze voran in den weitgeöffneten Schuh ein. Achten Sie darauf, dass die Ferse fest im Schuh sitzt.
- Schritt VII:** Schnüren Sie nun den Schuh fest, so dass er fest umschlossen ist.

Hinweis für den Orthopädietechniker:

Die AFO light ist vorkonfektioniert und in unterschiedlichen Größen und Höhen erhältlich. Die Orthese ist thermoplastisch verformbar, beschleifbar und individuell anpassbar. Fußgröße des Patienten messen und Orthese anhand der Größentabelle auswählen. Die Orthese an Fuß und Unterschenkel anhalten. Es ist darauf zu achten, dass Zehen und Fußsohle im Randbereich nicht überstehen. Gegebenenfalls eine größere Orthese auswählen. In manchen Fällen ist es erforderlich die Sohlengröße auf das Schuhwerk des Patienten anzupassen. Nach der Formgebung den Sohlenrand glattschleifen. Mittels eines Heißluftgebläses können Anpassungen in der Weite vorgenommen werden. Bei Sohlenzurichtungen, mit Pelotten oder Fußgewölbestützen, ist die Kontaktfläche vor dem Bekleben anzurauen.