

## ALLGEMEINE HINWEISE



### Nebenwirkungen:

Unter der Voraussetzung einer sachgemäßen Anwendung sind Nebenwirkungen bis jetzt nicht bekannt. Zu fest anliegende Orthesen können zu lokalen Druckscheinungen führen oder in seltenen Fällen Blutgefäße oder Nerven einengen.

### Kontraindikation:

Hauterkrankungen, -verletzungen in dem Bereich, in dem die Orthese zum Einsatz kommt, insbesondere mit entzündlichen Erscheinungen. Narben mit Schwellungen, Rötung und/oder Überwärmung, Lymphabflussstörungen.

### Entsorgung:

Bitte entsorgen Sie das Medizinprodukt nach Nutzungsende entsprechend der örtlichen Vorgaben.

### Gewährleistung:

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Bei unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen. Beachten Sie dazu auch die entsprechenden Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.

### Materialzusammensetzung:

Pflaster: 100% Polyester

Gurte: 100 % Polyamid

Schiene: Aluminium

### Pflegehinweise:

Die festen Bauteile mit einem feuchten Tuch abwischen. Gurte und Polster entfernen und mit einem milden Waschmittel von Hand waschen, mit ausreichend klarem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

NICHT in den Trockner geben.



### Sicherheitshinweise:

Die Orthese ist nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung und den aufgeführten Anwendungsgebieten zu tragen. Die nötige Stabilität für den angegebenen Versorgungsbereich kann nur dann gewährleistet werden, wenn die Orthese fest am Körper sitzt. Um einen optimalen Sitz der Orthese sicherzustellen, sollte das Produkt individuell von geschultem Fachpersonal angepasst werden.

Die Orthese ist nicht flamsicher und darf daher nicht in der Nähe von offenem Feuer getragen werden. Nehmen Sie selbständig keine Veränderungen an der Orthese vor, kontaktieren Sie zu diesem Zweck Ihren Orthopädietechniker. Sollte die Orthese Verschleißerscheinungen aufweisen, wodurch die Stabilität beeinflusst oder beschädigt wird, ist sie zu ersetzen.

Wir bitten Sie uns über alle, im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt, aufgetretenen Vorkommnisse und schwerwiegende Ereignisse in Kenntnis zu setzen.

### Vorgesehene Patientengruppe:

Angewendet wird das Medizinprodukt durch Patienten, die eine Einweisung von geschultem Fachpersonal erhalten haben. Das Medizinprodukt ist für jugendliche und erwachsene Patienten von 12 bis 99+ Jahren vorgesehen.

### Achtung!

Tragen Sie die Orthese nicht auf der Hose - ein optimaler Sitz sowie die Therapeutische Wirkung sind damit nicht gewährleistet -



Herstellung  
und Vertrieb:



Spektramed GmbH | Prämienstraße 96 | D-41844 Wegberg  
t 0 24 34 . 99 33 4-0 | f 0 24 34 . 99 33 4-20  
www.spektramed.de | info@spektramed.de



## Aktiv Genu / Sport / Ventral / Vario Gebrauchsanweisung



Version 1.0 / 03.2020

  
**Spektramed**  
Auf den Punkt gebracht

## Aktiv Genu / Sport / Ventral / Vario

### Bezeichnung:

Aktiv Genu / Sport / Ventral / Vario

### Hilfsmittelnummer:

23.04.03.3052

### Produktbeschreibung inklusive Zweckbestimmung:

Orthese zur mindestens zweidimensionalen Führung und Stabilisierung des Kniegelenks, mit selbsttragender Rahmenkonstruktion nach dem 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip aus festem Material mit einstellbaren Gelenken. Die Orthese umfasst den Ober- und Unterschenkel frontal und dorsal oder nur frontal sowie seitlich und wird mit Gurtbändern verschlossen.

### Indikation:

- Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks
- Meniskusverletzungen
- Genu recurvatum
- Funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen

### Wirkungsweise:

- Reduziert Innenrotation, begrenzt Subluxation der Tibia „vordere und hintere Schublade“, stabilisiert das Kniegelenk in der Sagittalebene

### Information für den Patienten:

Das Wichtigste Ziel bei Verletzungen des Kniegelenks ist die Beseitigung oder Linderung des Schmerzes. Außerdem gilt es die Beweglichkeit und Belastbarkeit wieder herzustellen. Hierzu ist es erforderlich, dass Kniegelenk während der prä-/postoperativen Phase oder im Rahmen einer konservativen Behandlung zu stabilisieren, bis Sie Ihr Knie wieder vollständig belasten können.

Daher ist es wichtig, die Anweisungen des Arztes, des Therapeuten oder Orthopädie-Technikers zu befolgen.

### Hinweise für den Orthopädietechniker:

Die Orthese muss auf die Anatomie des Patientenbeines durch mechanische Verformung angepasst werden, um eine optimale Passform zu erhalten und damit ein Herabrutschen der Orthese zu verhindern.

Die Variante Aktiv Genu Vario, wurde speziell für Patienten entwickelt, bei denen Ober- und Unterschenkelumfang stark differieren.

### Achtung!

Tragen Sie die Orthese nicht auf der Hose - ein optimaler Sitz sowie die Therapeutische Wirkung sind damit nicht gewährleistet -

### Anlegen der Orthese:

Öffnen Sie als erstes alle Gurtbänder. Falls Sie Verbände, Pflaster oder Ähnliches tragen, überprüfen Sie zunächst den korrekten Sitz. Streifen Sie nun die Orthese über das Bein und positionieren die Gelenke so, wie es Ihnen durch den Orthopädietechniker vermittelt wurde. Schließen Sie nun, in der Reihenfolge der Nummerierung die Gurte. Achten Sie bitte darauf, dass die Gurte immer fest geschlossen sind, damit ein Rutschen der Orthese verhindert wird.



Aktiv Genu:



Aktiv Genu Sport:



Aktiv Genu Ventral:

